

Midlinekateter

Fordele:

- ✓ **Perifert kateter med liggetid i op mod 29 dage**
- ✓ **Kan benyttes til blodprøvetagning**
- ✓ **Kan tåle højtrykskontrast**



Skyl rutiner:

- ✓ **Skyl med min. 10 ml NaCL 0,9% før, mellem og efter injektioner eller infusioner**
- ✓ **Der skylles altid med 2 x 10 ml NaCL 0,9% efter blodprøvetagning, transfusion eller sukkerholdige infusioner**
- ✓ **Katetre, der ikke er i daglig brug, skal skylles igennem hver 12. time med 10 ml NaCL 0,9%**


Seponering:

- ✓ **Seponeres som et normalt PVK**



Anlæggelse:

- ✓ **Ultralydsvejledt i armens dybe vener, i anæstesiologisk regi**

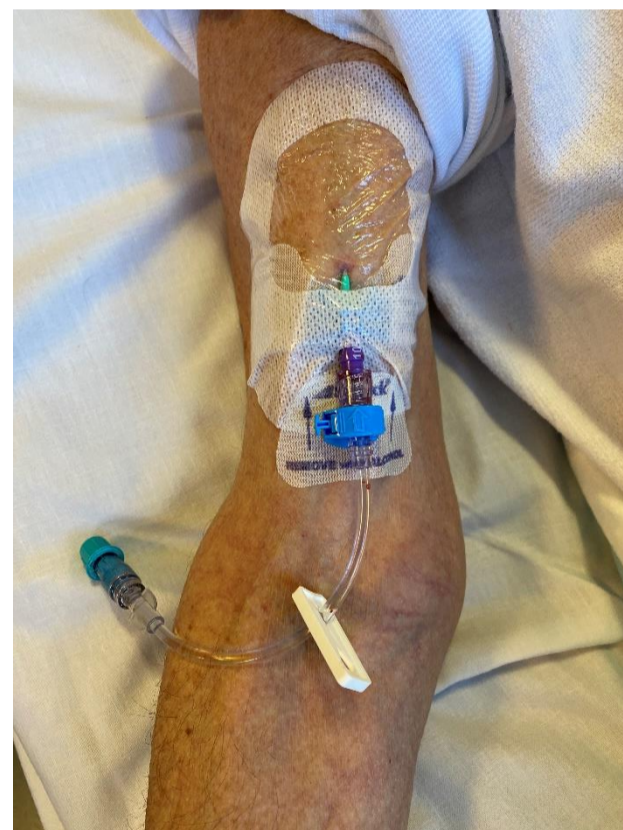

Forbindingsskifte:

- ✓ **Hver 7. dag inkl. Statlock**
- ✓ **Forlænger + desinficerbar membran skiftes hver 7. dag**
- ✓ **Desinficerbar membran skiftes efter blodadm. samt ved synlig forurening**